

# MediTurn® – Tablettenbox

## Gebrauchsinformation

Lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

### Inhalt MediTurn®:

1 Tablettenbox, Gebrauchsinformation.  
(Die MediTurn® Tablettenbox hat bei der Einzelabgabe keine Kennzeichnung mit Wochentagen.)

### Inhalt MediTurn® Wochenspender:

7 Tablettenboxen mit Kennzeichnung der Wochentage Montag-Sonntag, Wochenspender, Gebrauchsinformation.

### Hersteller:

Murrplastik Medizintechnik GmbH  
Gewerberg 11  
08223 Falkenstein



### Anwendung:

Box zur Aufbewahrung von Tabletten, Dragees und Kapseln.

07-2012

**Gebrauchsinweisung:**  
Für die ordentliche Bestückung und Entnahme der Tabletten ist der Anwender grundsätzlich selbst verantwortlich. Es dürfen keine Tabletten kleiner 1mm in der Tablettenbox aufbewahrt werden.

Es ist nicht empfohlen, lebensrettende, hochwirksame Medikamente aufzubewahren.

Es dürfen keine Medikamente mit hormonellen Wirkstoffen (z.B. Anti-Baby-Pille) in der Tablettenbox aufbewahrt oder mit ihr dosiert werden. Es ist zu berücksichtigen, dass die Tablettenbox keine Feuchtigkeitssperre besitzt. Tabletten welche nicht erhöhter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden dürfen (z.B. Brausetabletten), können in der Tablettenbox nicht aufbewahrt werden. Im Zweifel sind die Tabletten in ihrer Verkaufsverpackung zu belassen.

Es ist zu berücksichtigen, dass eine Identifikation der Tabletten nach der Entnahme aus der Verkaufsverpackung meist nicht mehr möglich ist. Deshalb ist bei der Bestückung der Tablettenbox und der Entnahme der Tabletten stets höchste Aufmerksamkeit geboten.

Medikamente sind Kindern stets unzugänglich aufzubewahren, ebenso die Tablettenbox.

Bei Unsicherheit oder Fragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Gebrauchsanleitung Tablettenbox MediTurn®:

#### 1. Öffnen

Um die Tablettenbox MediTurn® zu öffnen, schieben Sie den Schieber zum Anschlag bis er spürbar einrastet (Abb. 1).



Abb. 1

#### 2. Bestückung

Bitte beachten Sie beim Bestücken die Tageszeit im Sichtfenster!

Beginnen Sie mit „morgens“.

Falls „morgens“ noch nicht am Sichtfenster erscheint, öffnen und schließen Sie den Schieber so oft, bis „morgens“ im Sichtfenster erscheint.

Bestücken Sie die geöffnete Kammer mit den entsprechenden Tabletten der dazugehörigen Tageszeit (Abb. 2).



Abb. 2

#### 3. Schliessen

Um die Tablettenbox zu schließen, schieben Sie den blauen Schieber zum Anschlag bis er spürbar einrastet (Abb. 3). Dadurch wird die Kammer automatisch weitertransportiert und die nächste Tageszeit erscheint im Sichtfenster.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 noch dreimal (mittags, abends, nachts) und füllen Sie die Kammern nach Bedarf.



Abb. 3

#### 4. Entnahme der Tabletten

Öffnen Sie den Schieber und die im Sichtfenster genannte Kammer stellt Ihnen die Tablette(n) für diese Tageszeit zur Verfügung. Schließen Sie nach Entnahme gleich wieder die Kammer.

### Gebrauchsanweisung Spender:

#### 1. Bestücken des Spenders mit 7 MediTurn® Tablettenboxen

Stellen Sie den Wochenspender so vor sich auf, dass Sie die Beschriftung der Wochentage lesen können, links ist Montag, rechts Sonntag (Abb. 4).

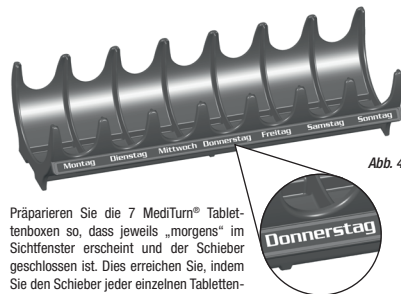


Abb. 4

Präparieren Sie die 7 MediTurn® Tablettenboxen so, dass jeweils „morgens“ im Sichtfenster erscheint und der Schieber geschlossen ist. Dies erreichen Sie, indem Sie den Schieber jeder einzelnen Tablettenbox entsprechend oft öffnen und schließen.

Wenn sichergestellt ist, dass alle 7 MediTurn® Tablettenboxen entsprechend vorbereitet sind, stecken Sie diese in die vorgesehenen Fächer des Wochenspenders jeweils mit dem Sichtfenster nach links. Die Box für Montag ganz links, daneben die für Dienstag, und so weiter (Abb. 5).

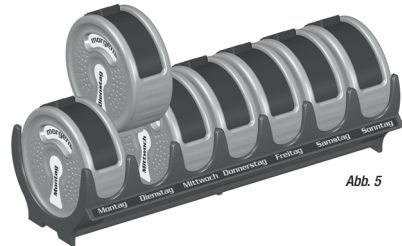


Abb. 5

Ein Sicherheitsmechanismus macht Sie dabei auf Fehler beim Einordnen aufmerksam: Nur wenn die Tablettenbox mit dem Sichtfenster nach links eingesteckt ist, lässt sie sich auch öffnen. Andernfalls dreht sie sich im Wochenspender, ohne die Öffnung frei zu geben. (Abb. 5a).

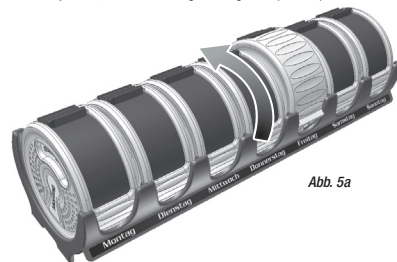


Abb. 5a

#### 2. Bestücken von 7 MediTurn® Tablettenboxen mit Tabletten

Öffnen Sie alle Schieber der 7 Tablettenboxen jeweils bis zum Anschlag (Abb. 6). Somit sind alle Kammern für „morgens“ geöffnet.

Sie sollten dies dadurch nochmals kontrollieren, indem Sie alle Kennzeichnungen innen an der Wand der geöffneten Kammer prüfen.

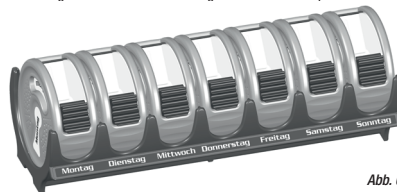


Abb. 6

Bei „morgens“ ist ein senkrechter Strich zu erkennen (Abb. 7). Bei der Kammer für „mittags“ sind zwei Striche, bei „abends“ drei und bei „nachts“ vier zu erkennen (Abb. 8 – 10). Dies sollte jetzt bei allen Tablettenboxen einheitlich sein. Ansonsten ist die abweichende Tablettenbox nochmals herausnehmen und entsprechend „durchzuschalten“.

Füllen Sie nun die Kammern für „morgens“ mit entsprechender/n Tablette/n. Wenn alle sieben Kammern befüllt sind, schließen Sie, am besten wieder von links nach rechts, alle Schieber bis zum Anschlag (Klick).



Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Anschließend öffnen Sie sie alle wieder bis zum Anschlag (klick). Nun ist an der linken „Montag“-Box die Bezeichnung „mittags“ im Sichtfenster erkennbar und auch bei allen Kammern sollten zwei Markierungsstriche sichtbar sein (Abb. 8). Füllen Sie nun diese Kammern entsprechend und wiederholen Sie den Vorgang noch 2x.

Falls für eine Tageszeit keine Tabletten einzunehmen sind, lassen Sie die Kammern einfach leer.

Nun stehen Ihnen 7 Einzelboxen für eine Woche fertig bestückt zur Verfügung. Nehmen Sie nun jeden Tag die entsprechende Tablettenbox aus dem Spender.

### Reinigung / Pflege:

Bewahren Sie ihre Tablettenbox stets in einem sauberen und trockenen Umfeld auf. Schließen Sie nach Entnahme der Tabletten den Schieber immer wieder um eine Verunreinigung der Kammern zu vermeiden.

Reinigen Sie die Tablettenbox regelmäßig, insbesondere die 4 Tablettenkammern, am besten mit einem trockenen Pinsel.

Zur Reinigung mit Wasser lässt sich die Tablettenbox zerlegen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie den Schieber der Tablettenbox.
2. Führen Sie ein geeignetes Werkzeug (z. B. einen Schraubenzieher) in die Kerbe auf der Rückseite der Tablettenbox ein (s. Abb. 11).

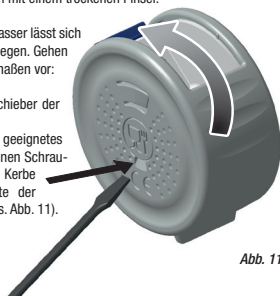


Abb. 11

3. Hebeln Sie den Verschlussstopfen in der Mitte der Tablettenbox vorsichtig heraus und legen Sie ihn beiseite (siehe Abb. 12–13).

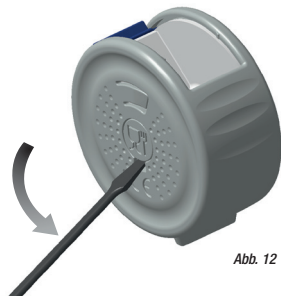


Abb. 12

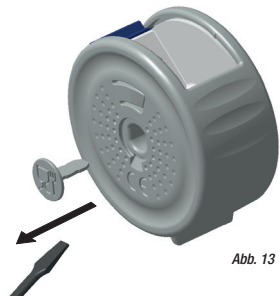


Abb. 13

4. Drücken Sie das Magazin mitsamt dem Deckel von innen durch den geöffneten Schieber heraus (siehe Abb. 14).

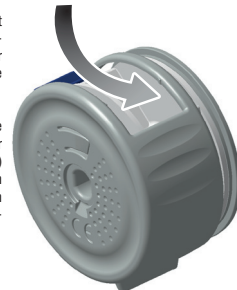


Abb. 14

5. Die Tablettenbox ist nicht zur Reinigung in der Geschirrspülmaschine oder in der Waschmaschine geeignet!

6. Reinigen Sie alle Teile mit warmem Wasser (evtl. Spülmittel zugeben) und einem weichen Tuch oder Schwamm. Danach alle Teile sorgfältig abtrocknen.

7. Bauen Sie die Tablettenbox in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Dazu das Magazin und den Deckel in das Gehäuse einschieben und anschließend mit dem Stopfen von der Rückseite aus wieder verschließen (siehe Abb. 15).

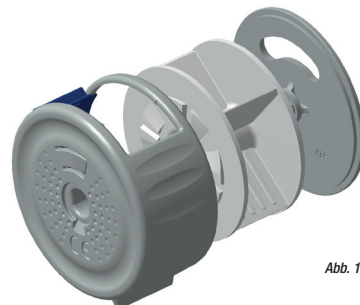


Abb. 15